



Andalan



ANTICONCEPTIVO INTRAUTERINO (AIU)

LIBRE DE HORMONAS

UN NUEVO CONCEPTO DE DIU

Lanzamiento
y Exclusividad
DKT

Exclusividad
DKT

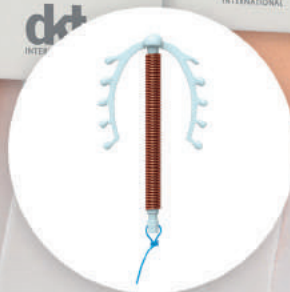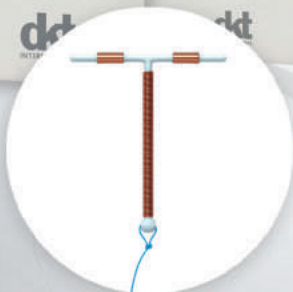


Conozca los Anticonceptivos Intrauterinos

Efectividad más de
99%

El AIU es un método anticonceptivo seguro, efectivo y económico. Ideal para mujeres que tienen restricciones a los métodos hormonales. Es una óptima opción para pacientes que no quieren preocuparse por métodos que requieren frecuencia y regularidad o incluso para aquellas que acaban olvidando las dosis.

Formas de actuación

En el endometrio: Actúa como espermicida, pues previene la fecundación creando un ambiente hostil para los espermatozoides.

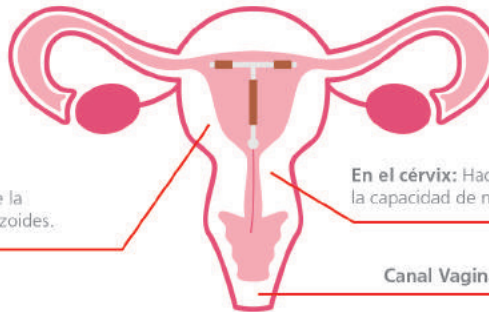

En el cérvix: Hace que el moco cervical más espeso, disminuye la capacidad de movimiento del espermatozoide.

Canal Vaginal

	Andalan Classic Cu 380	Andalan Classic Posparto Cu 380	Andalan Comfort Cu 375	Andalan Comfort Mini Cu 375	Andalan Silverflex Cu 380 Ag
	Durabilidad: 10 años		Durabilidad: 5 años		Durabilidad: 5 años
CARACTERÍSTICAS	<p>El anticonceptivo intrauterino está formado por un marco en "T" de polietileno que contiene Sulfato de Bario, para que sea radiopaco. Tiene una cobertura de cobre envuelta del brazo vertical, cilindros de cobre envueltos en cada extremo del brazo horizontal y un hilo de nailon en la parte inferior de armazón. El marco de polietileno tiene un peso de aproximadamente 176 mg. El tamaño de cobre tiene aproximadamente 380 mm² de exposición. Acompaña 1 tubo de inserción con marcador de profundidad y aplicador¹.</p>		<p>El anticonceptivo intrauterino está formado por un marco con brazos curvados para abajo para asegurar su permanencia en la posición correcta. Tiene una cobertura de cobre en el brazo vertical con aproximadamente 375 mm². Su cuerpo plástico contiene Sulfato de Bario para que sea radiopaco. El marco de polietileno tiene un peso de aproximadamente 334 mg. Tiene un hilo de nailon en la parte inferior del armazón. Acompaña un tubo de inserción con marcador de profundidad.</p>		<p>El anticonceptivo intrauterino está formado por un marco de polietileno que contiene Sulfato de Bario, para que sea radiopaco. Tiene una cobertura de cobre en el brazo vertical con aproximadamente 380 mm². El hilo de cobre tiene un hilo de plata. El marco de polietileno tiene un peso de aproximadamente 348 mg. Tiene un hilo de nailon en la parte inferior del armazón. Acompaña un tubo de inserción con marcador de profundidad.</p>
MODELO					

Beneficios:

- Método reversible inmediatamente después de la remoción;
- Libre de hormonas;
- No interfiere en la lactancia;
- No interfiere en las relaciones sexuales;
- **Posparto:** no necesita de pinzas para inserción;
- **Posparto:** tubo insertor exclusivo para el posparto;
- No disminuye el libido y el placer;
- Fácil inserción, rápida e aséptica;
- Indicado para mujeres en la fase de la adolescencia hasta la menopausia;
- Método no abortivo;
- **Posparto:** inserción en 10 minutos después de la expulsión de la placenta.

¹ El aplicador acompaña sólo el modelo Andalan Classic Cu 380